

FACE SHIELD

MÁSCARA
DE PROTEÇÃO
FACIAL

Proteja totalmente seu rosto e evite a propagação e contágio de doenças transmitidas pela saliva e fluídos nasais.

Converse de forma clara e sem ruídos, com proteção e conforto aliado a um design moderno.

- ✓ Higiênica e Reutilizável, permite a limpeza para posterior uso;
- ✓ Ideal para ambientes industriais, hospitalares, e de atendimento ao cliente em geral.



Fabricado de acordo com a Resolução do ministério da Saúde, RDC No 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020

MATERIAIS E DIMENSÕES

Elástico

Caseado e Ajustável

Suporte

Polipropileno copolímero
DIMENSÕES 17CM X 13,5CM

Visor

Polietileno Tereftalato (PETG)
DIMENSÕES
0,5MM X 250MM X 300MM

R\$ 10⁰⁰
valor unitário

Lote mínimo: 100 unidades

Pagamento: à vista | **Entrega:** consultar

A CADA MÁSCARA VENDIDA SERÁ DOADO R\$1,00 PARA ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

FACE SHIELD

MÁSCARA
DE PROTEÇÃO
FACIAL



SCHIOPPA
RODAS E RODÍZIOS

COMO MONTAR

- 01.** Retirar a película protetora do visor;
- 02.** Encaixar o visor na máscara primeiramente nos dois encaixes centrais;
- 03.** Encaixar os furos das extremidades em ambos os lados, um de cada vez. É necessário alinhar as extremidades da máscara para permitir o encaixe;
- 04.** Encaixar o elástico em ambos os lados. O elástico é fornecido com mais de um furo para poder permitir a regulagem.

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO

01

Realizar a limpeza e desinfecção em local apropriado.
Exemplo: Expurgo dos hospitais e similares;

02

Colocar luvas de procedimento hospitalar;

03

Prepare seu local de trabalho, onde você limpará o(s) escudo(s).
Desinfete a superfície da mesa corretamente antes de começar;

04

Não limpe vários escudos de uma só vez é recomendável separá-los para evitar a contaminação;

05

Para garantir que o visor seja limpo corretamente, recomendamos desmontá-lo primeiro.

www.schioppa.com.br | vendas@schioppa.com.br
telefone: (11) 2065-5200 | whatsapp: (11) 99154-6727